

*Здесь именно то, что Вы ищете*



Высокие технологии для витреоретинальной хирургии



# Здесь именно то, что Вы ищете:

MedOne Surgical - это высокоточное производство, тщательный контроль качества и быстрая удобная служба клиентской поддержки. Мы создаем инновационные продукты, которые помогают вам решить самые сложные задачи витреоретинальной хирургии.

## Содержание

- 4 Стандартные витреоретинальные канюли
- 4 Канюли-щеточки FlexTip™
- 5 Канюли FlexTip™
- 6 Канюли PolyTip®
- 7 Удлиняющая трубка
- 7 Двухходовые канюли
- 8 Канюли для введения вязких жидкостей
- 8 Инфузионные канюли
- 9 Инфузионные канюли VFI
- 9 Канюли для введения вязких жидкостей через порт троакара
- 10 Рефлюксные рукоятки
- 10 Рефлюксные инструменты
- 11 Выдвигающиеся Канюли FlexTip™
- 11 Выдвигающиеся Канюли PolyTip®



(Actual size)

С помощью изображений на коробке, можно с легкостью определить тип изделия.



## 20G продукты

- 3200 Канюля для вязкой жидкости (Hammer) , 4мм
- 3201 Канюля для вязкой жидкости (Hammer) , 6мм
- 3202 Инфузионные канюли, 4мм
- 3203 Инфузионные канюли , 6мм
- 3205 Канюля XL 0,9 мм
- 3208 Канюля XL FlexTip™ 0,9 мм (наконечник 3 мм)
- 3211 Канюля FlexTip™ (наконечник 6 мм)
- 3212 Канюля FlexTip™ (изогнутая)
- 3214 Канюля 0,9 мм
- 3215 Канюля-щеточка FlexTip™ (наконечник 1 мм)
- 3216 Канюля-щеточка FlexTip™ (наконечник 3 мм)
- 3217 Канюля для вязкой жидкости 0,9 мм
- 3236 Канюля PolyTip® (20/38G)
- 3237 Двухходовые канюли 0,9 мм
- 3238 Канюля FlexTip™ (наконечник 1 мм)
- 3249 Выдвигающаяся канюля PolyTip® (20/38g)
- 3279 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ (Активная)
- 3280 Рефлюксная рукоятка с канюлей (Пассивная)
- 3281 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ (Пассивная)
- 3282 Рефлюксная рукоятка со щеткой (Пассивная)
- 3284 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ (Активная)

## 25G продукты

- 3207 Канюля XL 0,5 мм
- 3210 Канюля XL FlexTip™ 0,5 мм (наконечник 3 мм)
- 3218 Канюля PolyTip® (25/31G)
- 3219 Канюля PolyTip® (25/38G)
- 3220 Канюля FlexTip™ 0,5 мм (наконечник 3 мм)
- 3221 Канюля FlexTip™ 0,5 мм (наконечник 1 мм)
- 3222 Канюля-щеточка FlexTip™ (наконечник 1.5 мм)
- 3224 Канюля FlexTip™ 0,5 мм (наконечник 5 мм)
- 3225 Канюля 0,5 мм
- 3226 Канюля PolyTip® VFI 7мм
- 3240 Двухходовые канюли 0,5 мм
- 3245 Инфузионная канюля VFI 0,5 мм
- 3247 Выдвигающаяся канюля PolyTip® (20/38g)
- 3293 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ (Пассивная)
- 3296 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ (Активная)
- 3298 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ (Активная)

## 23G продукты

- 3206 Канюля 0,6 мм
- 3209 Канюля XL FlexTip™ 0,6 мм (наконечник 3 мм)
- 3230 Канюля FlexTip™ 0,6 мм (наконечник 1 мм)
- 3231 Канюля FlexTip™ 0,6 мм (наконечник 3 мм)
- 3232 Канюля-щеточка FlexTip™ (наконечник 1.5 мм)
- 3233 Канюля PolyTip® (23/38G)
- 3234 Канюля 0,6 мм
- 3235 Канюля PolyTip® VFI 7мм
- 3239 Двухходовые канюли 0,6 мм
- 3241 Канюля PolyTip® VFI 10мм
- 3242 Канюля FlexTip™ 0,6 мм (наконечник 5 мм)
- 3246 Инфузионная канюля VFI 0,6 мм
- 3248 Выдвигающаяся канюля PolyTip® (20/38g)
- 3286 Рефлюксная рукоятка с канюлей (Пассивная)
- 3287 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ (Пассивная)
- 3288 Рефлюксная рукоятка со щеткой (Пассивная)
- 3290 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ (Активная)
- 3291 Рефлюксная рукоятка со щеткой (Активная)
- 3299 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ (Активная)

## 27G продукты

- 3257 Канюля 0,4мм
- 3258 Канюля FlexTip™ 0,4 мм (наконечник 1 мм)
- 3259 Канюля PolyTip® (27/38G)
- 3277 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ (Пассивная)
- 3278 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ (Активная)

## Другие продукты

- 3223 Удлиняющая трубка (Hammer)
- 3227 Аспирационная рукоятка (Пассивная)
- 3228 Аспирационная рукоятка (Активная)
- 3243 Удлиняющая трубка для введения жидкости под высоким давлением





## Стандартные витреоретинальные канюли


Тонкостенные канюли с тупым наконечником предназначены для введения или аспирации жидкостей. Канюли размера XL большей длины (36мм), облегчают доступ к сетчатке у пациентов с высокой близорукостью или длинным глазом. Тонкие стенки позволяют увеличить скорость потока. Оборудованы системой Luer Lock для надежного соединения с рефлюксной рукояткой или шприцом.



- 3214 Канюля (20G)**  
0,9 мм , Длина 28 мм
- 3205 Канюля XL (20G)**  
0,9 мм, длина 36 мм
- 3234 Канюля (23G)**  
0,6 мм , Длина 32 мм
- 3206 Канюля XL (23G)**  
0,6 мм, длина 36 мм
- 3225 Канюля (25G)**  
0,5 мм, Длина 32 мм
- 3207 Канюля XL (25G)**  
0,5 мм, длина 36 мм
- 3257 Канюля (27G)**  
0,4мм , Длина 32 мм

## Канюли-щеточки FlexTip™ (с гибким наконечником)

Мягкая силиконовая щетка позволяет нежно очищать сетчатку и совершать манипуляции с ней

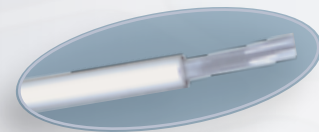


- 3215 Канюля-щеточка FlexTip™ 0,9 мм (20G)**  
Длина 32 мм, силиконовый наконечник-щеточка 1 мм
- 3216 Канюля-щеточка FlexTip™ 0,9 мм (20G)**  
Длина 28 мм, силиконовый наконечник-щеточка 3 мм
- 3232 Канюля-щеточка FlexTip™ 0,6 мм (23G)**  
Длина 32 мм, силиконовый наконечник-щеточка 1,5 мм
- 3222 Канюля-щеточка FlexTip™ 0,5 мм (25G)**  
Длина 32 мм, силиконовый наконечник-щеточка 1,5 мм

3222 Фотографии не в масштабе

## Канюли FlexTip™ (с гибким наконечником)

Канюли FlexTip™ снабжены мягким гибким силиконовым наконечником для аккуратного доступа к сетчатке. Идеальны для аспирации субретинальной жидкости через существующий разрыв или отверстие. Снабжены системой Luer Lock для надежного соединения с рефлюксной рукояткой или шприцом. Удлиненный силиконовый наконечник позволяет достигать труднодоступных участков при аспирации субретинальной жидкости. Канюли размера XL большей длины (36мм),облегчают доступ к сетчатке у пациентов с высокой близорукостью или длинным глазом.

- 3238 Канюля FlexTip™ 0,9 мм (20G)**  
Длина 32 мм, силиконовый наконечник 1 мм
- 3211 Канюля FlexTip™ 0,9 мм (20G)**  
Длина 28 мм, силиконовый наконечник 6 мм
- 3212 Канюля FlexTip™ 0,9 мм (20G) изогнутая**  
Длина 28 мм, силиконовый наконечник 6 мм
- 3208 Канюля XL FlexTip™ 0,9 мм (20G)**  
длина 36 мм, силиконовый наконечник 3 мм
- 3230 Канюля FlexTip™ 0,6 мм (23G)**  
Длина 32 мм, силиконовый наконечник 1 мм
- 3231 Канюля FlexTip™ 0,6 мм (23G)**  
Длина 32 мм, силиконовый наконечник 3 мм
- 3242 Канюля FlexTip™ 0,6 мм (23G)**  
Длина 32 мм, силиконовый наконечник 5 мм
- 3209 Канюля XL FlexTip™ 0,6 мм (23G)**  
длина 36 мм, силиконовый наконечник 3 мм
- 3221 Канюля FlexTip™ 0,5 мм (25G)**  
Длина 32 мм, силиконовый наконечник 1 мм
- 3220 Канюля FlexTip™ 0,5 мм (25G)**  
Длина 32 мм, силиконовый наконечник 3 мм
- 3224 Канюля FlexTip™ 0,5 мм (25G)**  
Длина 32 мм, силиконовый наконечник 5 мм
- 3210 Канюля XL FlexTip™ 0,5 мм (25G)**  
длина 36 мм, силиконовый наконечник 3 мм
- 3258 Канюля FlexTip™ 0,4 мм (27G)**  
Длина 32 мм, силиконовый наконечник 1 мм

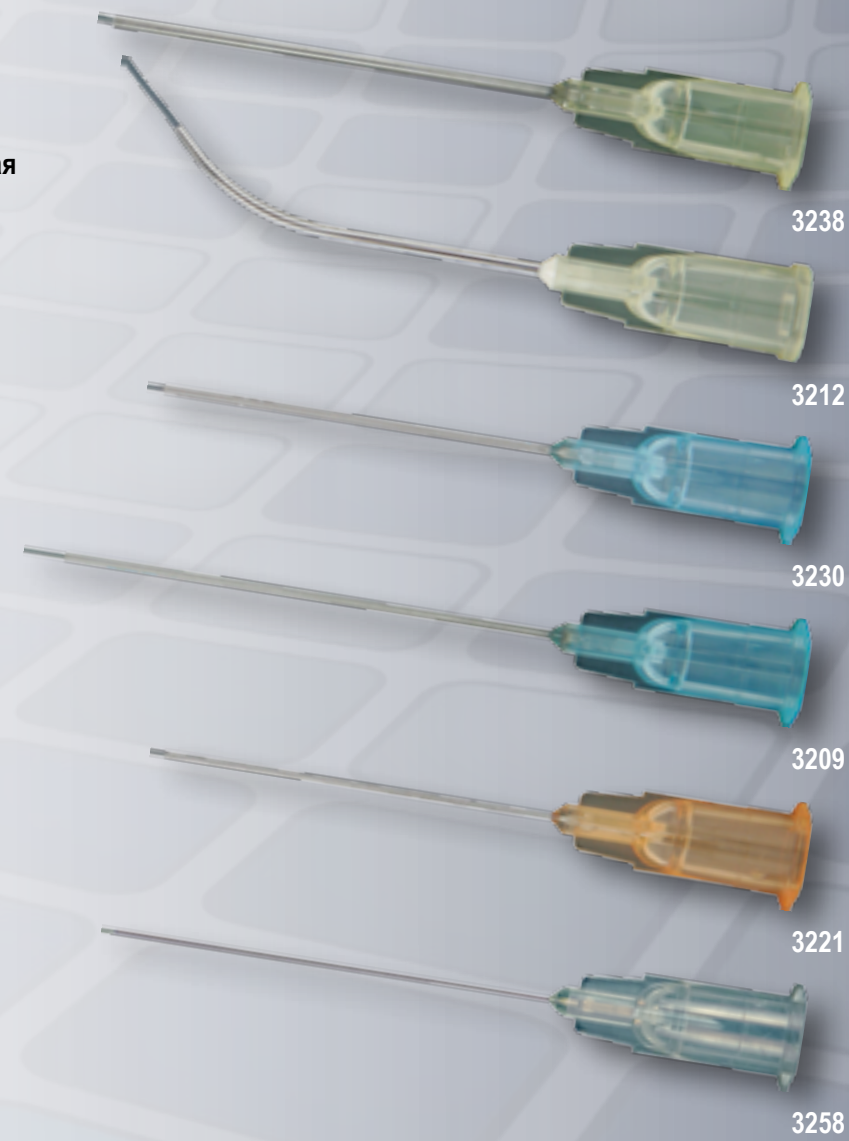

Фотографии не в масштабе



## Канюли с изменяющимся диаметром PolyTip®

Канюли с изменяющимся диаметром PolyTip® имеют уникальные технические характеристики: полугибкий наконечник очень маленького диаметра с чрезвычайно тонкими стенками позволяет обеспечить максимально возможный поток жидкости. Система Luer lock надежно соединяет канюлю с инфузионной линией, шприцом или удлиняющей трубкой.

*Канюля 31G идеально подходит для дренажа макулярного отверстия и аспирации жидкости*

- 3218 Канюля PolyTip® 25/31G**  
 Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 25G 0,5 мм, диаметр наконечника 31G 0,26 мм, длина наконечника 5 мм

*Канюля 38G идеально подходит для субретинальных инъекций*

- 3236 Канюля PolyTip® 20/38G**  
 Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 20G 0,9 мм, диаметр наконечника 38G 0,12 мм, длина наконечника 5 мм
- 3233 Канюля PolyTip® 23/38G**  
 Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 23G 0,6 мм, диаметр наконечника 38G 0,12 мм, длина наконечника 5 мм
- 3219 Канюля PolyTip® 25/38G**  
 Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 25G 0,5 мм, диаметр наконечника 38G 0,12 мм, длина наконечника 5 мм
- 3259 Канюля PolyTip® 27/38G**  
 Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 27G 0,4 мм, диаметр наконечника 38G, 0,12 мм, длина наконечника 5 мм

3218

3236

Фотографии не в масштабе

## Удлиняющая трубка

Короткая силиконовая удлиняющая трубка отделяет шприц от канюли, позволяя точно позиционировать канюлю, когда инъекция выполняется другой рукой или когда инъекцию выполняет ассистент. Просвет трубки имеет объем всего 0,2 мл что сокращает потерю жидкости и увеличивает скорость доставки жидкости в место инъекции. Идеально подходит для субретинального введения жидкости, с использованием канюль PolyTip®.

- 3223 Удлиняющая трубка (Hammer)**  
 силиконовая трубка длиной 5 см с замками Luer lock (папа/мама)

3223

## Двухходовые канюли

Коаксиальные канюли с двумя отверстиями позволяют одновременно вводить жидкость, такую как перфлуокарбон или краситель, через центральный просвет внутренней канюли, и снижать давление благодаря пассивному выходу жидкости или воздуха через вентиляционное отверстие в наружной канюле. Компания MedOne использует внутренние канюли с чрезвычайно тонкими стенками, что обеспечивает прекрасный уровень подачи жидкости даже при хирургии 25G. Внутренняя канюля на 3мм длиннее наружной  
 Общая длина 31мм.

- 3237 Двухходовые канюли 0,9 мм (20G)**
- 3239 Двухходовые канюли 0,6 мм (23G)**
- 3240 Двухходовые канюли 0,5 мм (25G)**



Фотографии не в масштабе



## Инфузионные канюли для введения вязких жидкостей


Усиленные стенки трубок инфузионных канюль позволяют быстро ввести силиконовое масло под высоким давлением при хирургии 20 G. Канюля может быть использована также для введения БСС. Выступы для подшивания зеленого цвета, что улучшает их визуализацию. Система Luer lock надежно соединяет канюлю с инфузионной линией.



3201

**3200** Канюля для вязкой жидкости (Hammer), 4мм **20G**

**3201** Канюля для вязкой жидкости (Hammer), 6мм **20G**  
Инфузионная трубка 16см, подходит для введения тяжелых жидкостей под высоким давлением

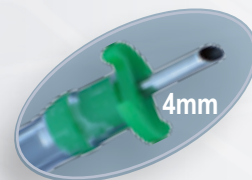

4mm



6mm

## Инфузионные канюли

Тонкие стенки канюли (0,9мм, 20G) позволяют достичь максимальной скорости подачи. Доступны канюли длиной 4 и 6 мм. Гладкий скошенный наконечник канюли позволяет легко вводить ее через склеротомию. Выступы для подшивания зеленого цвета, что улучшает их визуализацию.



3203

**3202** Инфузионные канюли, 4мм **20G**

**3203** Инфузионные канюли, 6мм **20G**  
Инфузионная трубка 25см, подходит для введения растворов (БСС) или газа

Фотографии не в масштабе

## Инфузионные канюли VFI

Канюли VFI специально предназначены для введения силиконового масла «hands-free» через трокар при выполнении операций 23 и 25G, при этом силикон вводится в 2 раза быстрее, чем при использовании обычных канюль. Просто установите канюлю VFI в порт трокара и вводите силиконовое масло или БСС. Идеальна для обмена PFO на силиконовое масло.




3246

**3245** Инфузионная канюля VFI (25G) 0,6 мм

**3246** Инфузионная канюля VFI (23G) 0,5 мм

## Канюли для введения вязких жидкостей через порт трокара


Канюли PolyTip® VFI имеют очень тонкие стенки, что позволяет вводить тяжелые жидкости, такие как силиконовое масло через порты 23 или 25 G. Система Luer lock надежно соединяет канюлю с инфузионной линией, шприцом или удлиняющей трубкой.

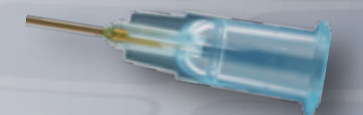

3235

**3235** Канюля PolyTip® VFI 0,6 (23G)

Длина канюли 7 мм

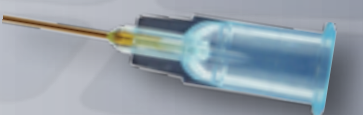

3241

**3241** Канюля PolyTip® VFI 0,6 (23G)

Длина канюли 10 мм


длина канюли 10мм позволяет вводить силикон в различные сегменты глаза, а так же позволяет видеть наконечник канюли во время ее использования.



3226

**3226** Канюля PolyTip® VFI 0,5 (25G)

Длина канюли 7 мм

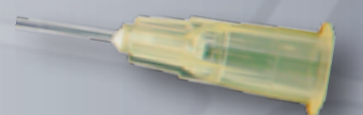

3217

**3217** Канюля для вязкой жидкости 0,9 мм (20G)

Длина канюли 8 мм

**3243** Удлиняющая трубка для введения жидкости под высоким давлением

силиконовая трубка длиной 16см с замками Luer lock (папа/мама). Может быть использована с вышеперечисленными канюлями для введения тяжелых жидкостей таких как силиконовое масло



3243

Фотографии не в масштабе



## Рефлюксные рукоятки

Короткие ручки рефлюксных рукояток MedOne облегчают действия хирурга в пределах операционного поля и улучшают визуализацию, особенно при использовании широкоугольных систем. Замок луер быстро и надежно соединяет рукоятки с любой канюлей MedOne. Большой резервуар рукоятки увеличивает объем рефлюкса




3227 Аспирационная рукоятка Пассивная

3228 Аспирационная рукоятка Активная

## Рефлюксные инструменты

Компания MedOne объединила самые популярные канюли и аспирационные рукоятки в один удобный инструмент, позволяющий точно контролировать аспирацию. Есть инструменты с активной и пассивной аспирацией.

- Рефлюксная канюля FlexTip™ имеет силиконовый наконечник длиной 1 мм
- Рефлюксная канюля-щетка имеет силиконовый наконечник длиной 1,5 мм

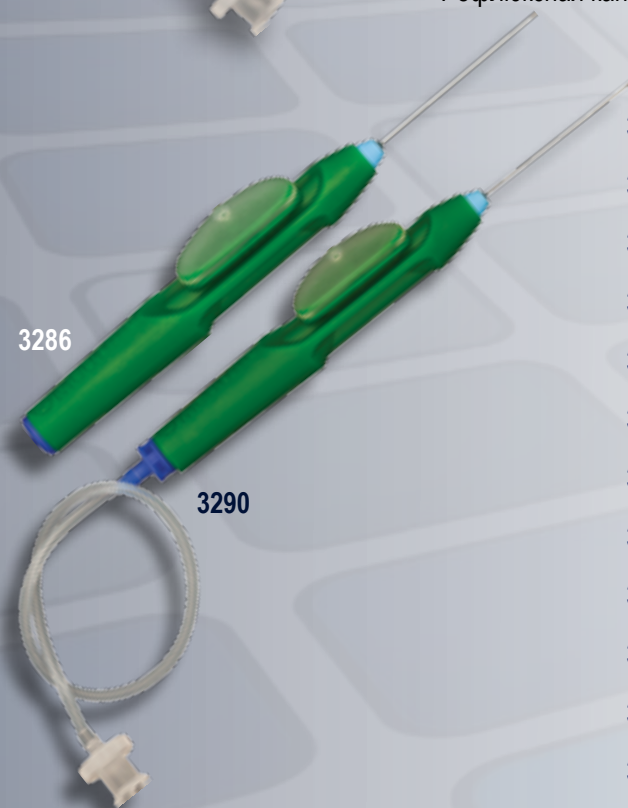

3280	Рефлюксная рукоятка с канюлей	(20G)	Пассивная
3281	Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™	(20G)	Пассивная
3282	Рефлюксная рукоятка со щеткой	(20G)	Пассивная
3284	Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™	(20G)	Активная
3286	Рефлюксная рукоятка с канюлей	(23G)	Пассивная
3287	Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™	(23G)	Пассивная
3288	Рефлюксная рукоятка со щеткой	(23G)	Пассивная
3290	Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™	(23G)	Активная
3291	Рефлюксная рукоятка со щеткой	(23G)	Активная
3293	Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™	(25G)	Пассивная
3296	Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™	(25G)	Активная
3277	Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™	(27G)	Пассивная
3278	Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™	(27G)	Активная

Фотографии не в масштабе

## Выдвигающиеся инструменты

Выдвигающиеся инструменты позволяют выдвинуть или полностью убрать наконечник канюли. Представлены в двух вариантах: выдвигающаяся силиконовая канюля FlexTip™ или выдвигающаяся канюля 38 g PolyTip®. Когда силиконовый наконечник полностью убран в металлическую оболочку, канюля легко проходит через порт троакара.


### Выдвигающиеся канюли FlexTip™

Канюля имеет мягкую силиконовую трубку, которая может быть выдвинута до 7 мм. Резервуар канюли позволяет создать рефлюкс даже когда канюля выдвинута. Инструмент идеально подходит для субретинального дренажа, особенно в случаях наличия жидкости на периферии сетчатки далеко от разрыва.

3279 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ (20G) Активная

3299 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ (23G) Активная

3298 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ (25G) Активная

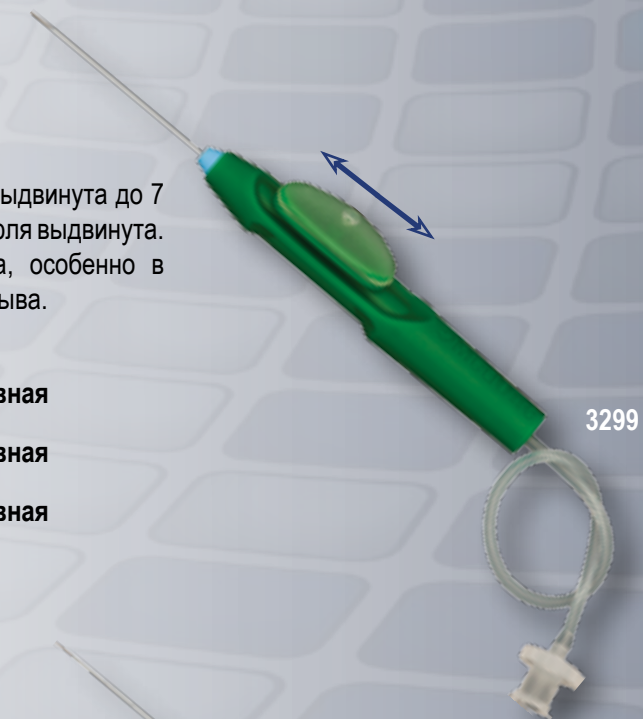

### Выдвигающиеся канюли PolyTip®

Эти канюли снабжены наконечником 38g, они идеально подходят для субретинальных инъекций. Наконечник достаточно жесткий, для того чтобы пройти через сетчатку без предварительной ретиномии. Наконечник может быть выдвинут до 5 мм.

3249 Выдвигающаяся канюля PolyTip® (20/38G) 0,9мм/0,12 мм

3248 Выдвигающаяся канюля PolyTip® (23/38G) 0,6мм/0,12 мм

3247 Выдвигающаяся канюля PolyTip® (25/38G) 0,5мм/0,12 мм



Фотографии не в масштабе



## **MedOne Surgical, Inc.**

670 Tallevast Road  
Sarasota, FL 34243 USA  
TEL: 941.359.3129  
FAX: 941.359.1708  
TOLL FREE (in USA): 1.866.633.6631 [www.MedOne.com](http://www.MedOne.com)